



Laddnings Guide for Akreos® AO

IOL injektor Viscoject™ BIO 1.8 (LP604350C) og 2.2 (LP604340)


Akreos®
Advanced Optics Aspheric Lens

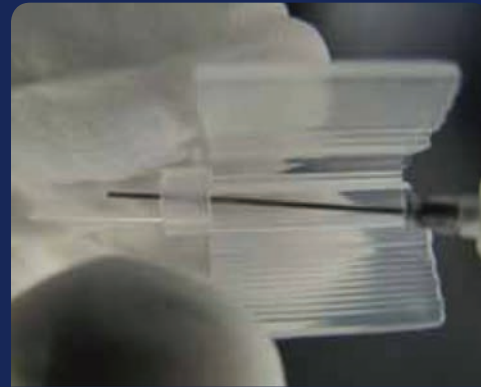

1. Fyll den spisse enden av cartridge med Bausch + Lomb visko.

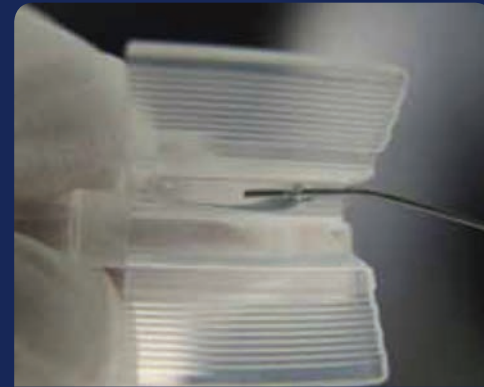

2. Plasser to streker visko i gropene i cartridge. Appliser også en dråpe visko på den blå silikonputen.

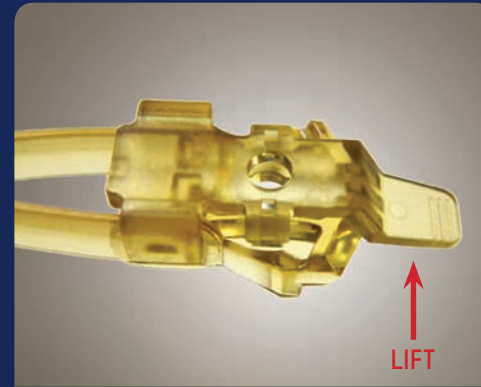


3. Snu holderen som vist på bildet, så den fremre siden av linsen er vendt oppover. Fjern beskyttelsen ved å løfte den opp vertikalt.



4. Løft opp linsen vertikalt ved å gripe tak i optikken med en vinklet, tannløs pinsett.



5. Kontroller at fremre side vender opp, med orienteringsindikatoren på øvre, høyre og nedre, venstre bein, og plasser linsen i midten av cartridge.

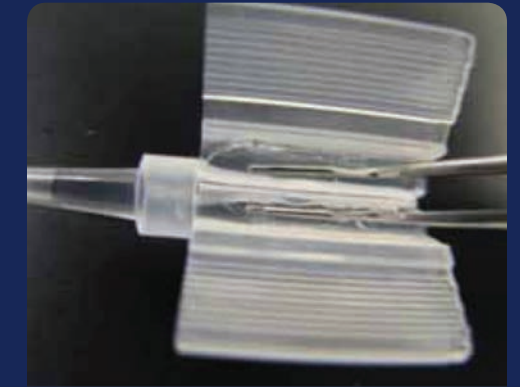

6. Trykk forsiktig ned begge sidene på linsen symmetrisk med pinsetten slik at haptikken ligger innenfor kanten av sidefurene på cartridge.




7. Trykk vingene sammen til de slår seg sammen.



8. Kontroller at haptikken ikke sitter i klem mellom vingene.



9. Med stempelet dratt helt ut, sett inn cartridge så langt fram i den fremre delen av injektoren som mulig.

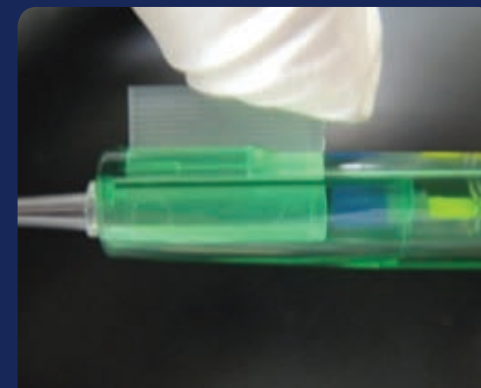

10. Trykk vingene lett ned, trykk så forsiktig ned stempelet og sikre at silikonputen går inn i cartridge og fanger linsen korrekt.



11. Trykk stempelet fremover til fjæringen blir lett sammentrykt. Når man slipper trykket på stempelet, kommer det til å flytte seg noen millimeter bakover. Linsen er nå klar til injisering.



12. For ytterligere informasjon, se Viscoject BIO 1.8 bruksanvisning.